



Athomer Propolis Spray 150ml

Атомер Прополис Спрей – спрей для носа на основе стерильной, неразведенной, изотонической морской воды Эгейского моря с натуральным микроэлементным составом с экстрактом прополиса. Морская вода бережно очищает нос, способствует выведению слизи и поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки. Прополис оказывает успокаивающее и смягчающее действие, облегчает очищение носовой полости, обладает умеренным антисептическим действием.

Форма выпуска:

Спрей для носа Атомер Прополис 150 мл (1050 доз) с насадкой распылителем и защитным колпачком.

Состав: стерильная изотоническая морская вода с прополисом, 0.5% водным раствором. Стерильная морская вода содержит весь комплекс необходимых микроэлементов, включая хлор, натрий, кальций, магний, калий.

Основное действие:

- Очищает нос от слизи, аллергенов, пыли и загрязнений.
- Устраняет заложенность носа.
- Увлажняет слизистую оболочку носа.

Основные свойства:

- Разрешен к применению, как детям от 1 года, так и взрослым.
- Абсолютно натуральный продукт, родом из чистого Эгейского моря Греции. 100% морская вода, без добавления дистиллированной воды. Технология электродиализа позволяет достичь изотонического раствора, без потерь ценных микроэлементов морской воды и сохранить всю ее целебность.
- Натуральный экстракт прополиса, очищенный от воска и пыльцы, не вызывает аллергии
- Не вызывает привыкание
- Не содержит пропеллентов, консервантов и красителей.
- Выпускается в стерильном виде.

Атомер Прополис Спрей применяют:


- Для гигиены и очищения носа от слизи, аллергенов, загрязнения и пыли, а также для разжижения и выведения выделений, что предотвращает отоларингологические инфекции, бронхит и другие респираторные проблемы.

- Для увлажнения слизистой носа при длительном нахождении в помещениях с отоплением или кондиционированием.
- Как профилактическое средство от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
- При отечности и заложенности носа, связанной с респираторными заболеваниями

Способ применения

Атомер Прополис оборудован специальным распылителем, легким в применении и обеспечивающий глубокое и мягкое орошение слизистой оболочки носа, не допуская ее повреждения. Впрыскивание контролируется автоматически.

Поместите распылитель в носовой проход и слегка надавите на его край. Рекомендуется делать минимум 4 впрыскивания в каждую ноздрю до 4 раз в день, с целью профилактики - 1-2 впрыскивания в день.

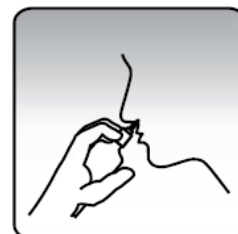

Противопоказания

Противопоказан при наличии аллергических реакции на компоненты продукта.

Предостережение

Только для наружного применения.

Использование насадки распыления более чем одним человеком увеличивает риск распространения инфекции.

Не рекомендуется детям до 1 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Без рецепта врача

Производитель:

PHARMACOSMETIC - DIAFARM G.SOULTOGIANNIS CO. E.E.,

Ypsilanti str., Paralimni

57001 Thermi, Thessaloniki , Greece

Tel: +302310486320; +302310486321

Fax: +302310486322

bioplant@otenet.gr

Импортер в Республике Молдова:

Prosanitas Farm SRL

bd.Moscova 15/3 of.47 MD-2068

Chisinau, Moldova

Tel/Fax: +37322604255

office@prosanitasfarm.com